

Verkorte handleiding CoaguChek PRO II voor NPT huizen

1. Zet het apparaat aan door kort op de aan/uit knop te drukken.



2. Voer in bij gebruiker, je eigen (achter)naam.
3. Tik in het scherm op patiënten test.
4. Toets bij patiënten- ID de achternaam en geboortedatum van de patiënt in.
5. Toets op het ✓ hierna geeft het display aan dat u nu een teststrook in de meter moet schuiven.
6. Voer de teststrook in. Er volgt een piep/signaal dat de meter de teststrook heeft gedetecteerd.



7. Een zandloper verschijnt in beeld. Begin met de vinger te masseren. Na +/- 1 minuut volgt een korte piep/signaal. Op het display verschijnt een teststrook met een bloeddruppel en de tijd in seconden (telt af van 180 naar 0 sec)



8. Prik nu aan de zijkant van de vingertop.
Masseer/stuw het bloed naar de vingertop tot er een grote bloeddruppel vormt.
Leg deze druppel binnen 15 seconden op de teststrook of laat het druppeltje bloed tegen de zijkant v.d. strip opzuigen. Bij voldoende opgebracht bloed volgt een korte piep / signaal.



9. Leg het apparaat zachtjes horizontaal neer op een vlakke ondergrond. Raak het toestel en de strip niet meer aan. Er verschijnt in het scherm QC ✓ (interne controle van de strip is OK).



10. Wacht op de uitslag.
Bij foutmeldingen de test herhalen.

Bij twijfel over de meting of over het testresultaat kan de test naar eigen inzicht herhaald worden.

Bij INR-uitslagen van 8.0 of > 8.0 de test herhalen en beide uitslagen doorgeven.

Noteer altijd bijzonderheden bij een INR lager dan 1.5 of hoger dan 6.0. Noteer bij invoer van INR 8.0 of de INR exact 8.0 is of dat deze groter is dan 8.0.

Tips vingerprik

- Prik hoog in de vingertop
- Stuw vanaf de handpalm naar de vingertop in 1 beweging
- Maak een grote druppel bloed
- Maak eventueel met water en zeep de vinger goed schoon en droog indien patiënt klamme handen heeft

- Bij koude vingers, handen enkele minuten laten opwarmen onder warme kraan en goed afdrogen
- Verwissel alleen de codechip bij ingebruikname van strips met een andere code



Validatie / Controles

- De door ons uitgegeven strips zijn gevalideerd.
- Controles op de apparaten bij NPT huizen worden 2x jaar uitgevoerd door de trombosedienst. Van te voren wordt overlegd met de coördinator op welke dag de trombosedienst langskomt.

Reinigen van de meter

Reinigen van de meter buitenkant

- Reinig de buitenkant van de meter met een licht bevochtigde doek.
- Droog de meter hierna goed af met een schone, niet-pluizende doek.

Reinigen van de teststrokengeleider

Controleer regelmatig of de teststrokengeleider vervuild is. Als er bloed in de teststrokengeleider terecht is gekomen of als deze ergens anders vervuild is, moet dit schoongemaakt worden.

- Verwijder de klep van de meetkamer door de voorkant (b.v. met de nagel van uw duim) omhoog te drukken. Hierna kunt u de klep van de meetkamer (losgemaakt van de meter) met water reinigen.
- Reinig de makkelijk toegankelijke, witte delen met een niet-pluizende depper of een bevochtigd wattenstaafje (met Bacillol plus). **Zorg, dat er absoluut geen vloeistof in de meter terecht komt.** Schuif geen voorwerpen in de teststrokengeleider. De elektrische contacten achter de teststrokengeleider kunnen hierdoor beschadigen.
- Laat de binnenkant van de teststrokengeleider ca. 10 minuten drogen.
- Plaats de klep van de meetkamer na deze droogtijd weer terug in de behuizing. Let er op, dat de teststrokengeleider zich in de juiste positie bevindt en correct is teruggeplaatst.
- Controleer of de klep weer goed is gesloten.